

# PR5 TT

## ALL IN ONE



### Manual de USUARIO

Antes de operar este equipo lea atentamente el manual de usuario para un uso seguro y eficaz del ventilador pulmonar de alta complejidad modelo PR5-TT.

## Interfaz de usuario


• Lea atentamente del Manual de Usuario:

**Advertencias, precauciones y notas**

**Capítulo 1 – Descripción general**


**Capítulo 2 – Identificación de componentes, accesorios y partes**

### | Vistas laterales

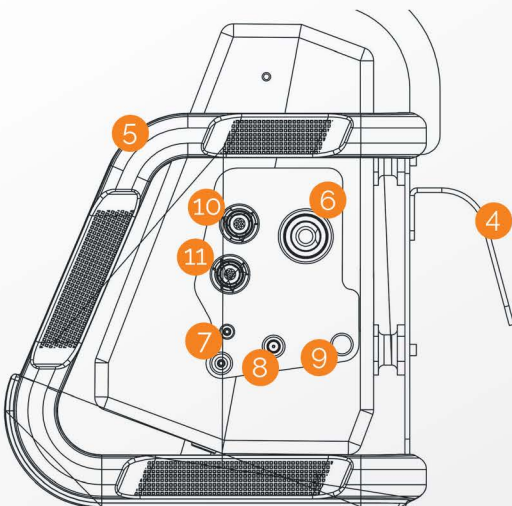

#### Vista lateral derecha del PR5-TT


4. Gancho para camilla
5. Protección lateral derecha
6. Conector salida paciente
7. Conectores para sensor del flujo proximal
8. Conector para presión vía aérea proximal (PAW)
9. Conector para válvula espiratoria
10. Conector capnografía
11. Conector oximetría

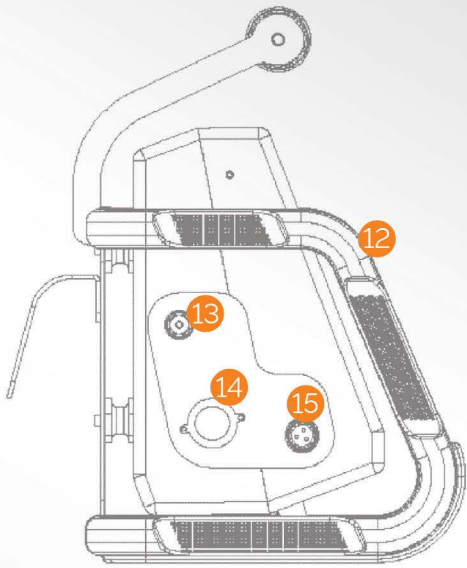

### Vista lateral izquierda del PR5-TT

- 12. Protección lateral izquierda
- 13. Conector para suministro de O<sub>2</sub>
- 14. Filtro de aire externo
- 15. Conector de alimentación eléctrica

### Vista inferior

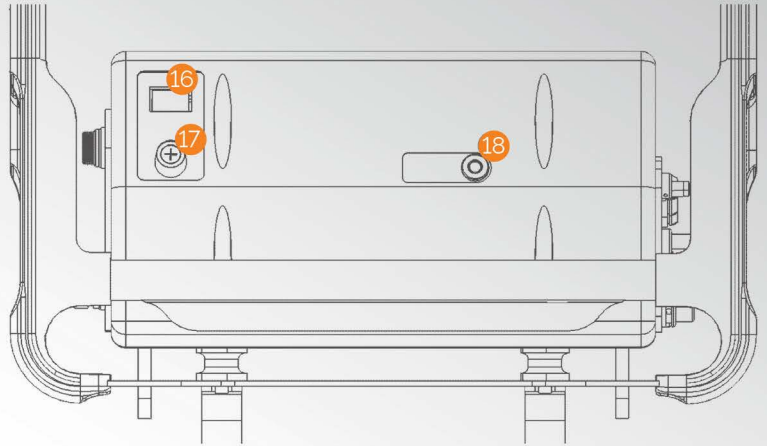

### Vista Inferior del PR5-TT


- 16. Interruptor encendido/apagado
- 17. Portafusible
- 18. Botón calibración de pantalla táctil

## Capítulo 3 – Instrucciones de funcionamiento

### Conexiones del equipo

#### Conexión del filtro de aire externo

Paso 1

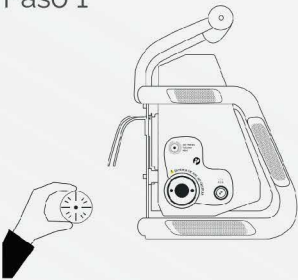


Paso 2



Paso 3




Paso 4

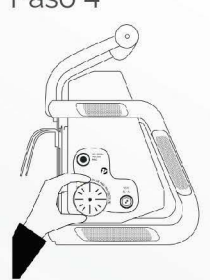


#### Conexión del circuito respiratorio

Circuito respiratorio de rama inspiratoria única.

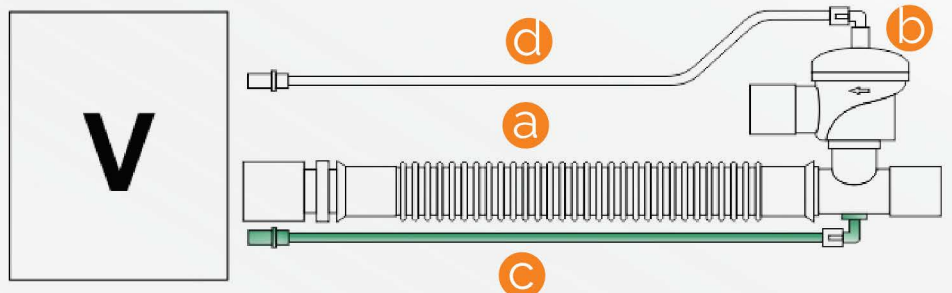

- a. Rama inspiratoria única
- b. Válvula espiratoria
- c. Manguera para medición proximal de la presión de vía aérea (PAW)
- d. Manguera para control de la válvula espiratoria

## Esquema de conexión de accesorios

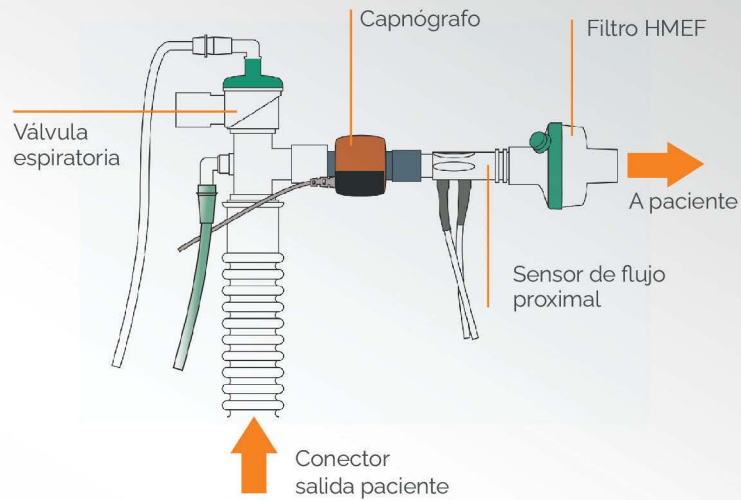


## | Instrucciones de uso y configuraciones iniciales

### Resumen de la secuencia normal de inicialización

1. Conectar los accesorios al PR5-TT.
2. Pulsar el interruptor encendido/apagado para encender el equipo.
3. Realizar la calibración de la pantalla táctil.
4. Efectuar las configuraciones correspondientes en la pantalla inicial.
5. Presionar el botón "Iniciar".
6. En la pantalla principal, efectuar todas las configuraciones deseadas: modo y parámetros ventilatorios, gráficos a mostrar, etc.
7. Iniciar la ventilación.

### Pantalla de Inicio

Permite seleccionar el tipo de paciente a ventilar (adulto, pediátrico y neonatal), sexo, altura, peso teórico, y volumen ventilatorio por kilogramo. También se puede seleccionar el tipo de interfaz del paciente y sus dimensiones.

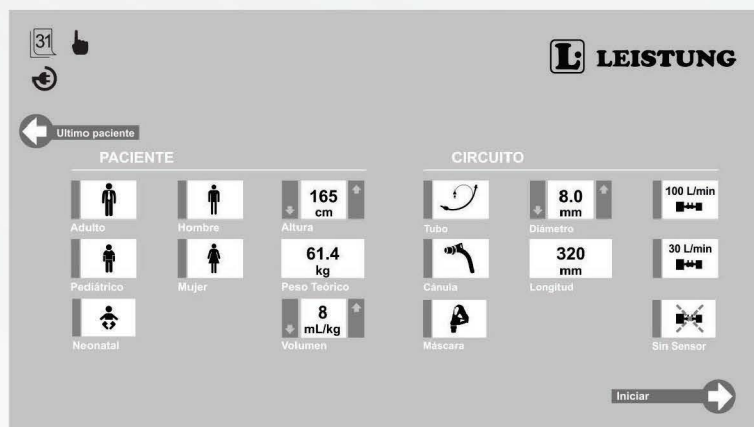

## Pantalla principal

The diagram shows the main screen of the LEISTUNG device with the following callouts:

- 1** Área de íconos: Points to the top bar containing icons for VCV, CO2, and a thumbs up.
- 2** Área de información: Points to the patient information section (Adulto).
- 3** Área de alarmas: Points to the alarm status area (Oxígeno 100%, Disparo Manual, etc.).
- 4** Área de monitoreo dinámico y ajuste de alarmas: Points to the central dynamic monitoring and alarm adjustment area.
- 5** Área de ajustes: Points to the bottom adjustment bar.
- 6** Área de controles de selección: Points to the 'Iniciar' button and a close button.
- 7** Área de gráficos: Points to the central multi-panel graph area.
- 8** Área de accesos directos y menú principal: Points to the right-hand menu area.

Bv. Los Venecianos 6595  
Córdoba (X5022RWT)  
Tel: +54 0351 4759112/15

Pasteur 721  
Capital Federal (C1028AAO)  
Tel: +54 011 49542339

COMERCIO NACIONAL  
Tel: +54 0351 4759112/15 Int.1/211  
ventas@leistungargentina.com.ar

COMERCIO EXTERIOR  
Tel: +1 786 326 3936  
sales@leistung-usa.com

ASISTENCIA TÉCNICA

+54 9 351 238 3134  
asistencia@leistungargentina.com.ar

[info@leistungargentina.com.ar](mailto:info@leistungargentina.com.ar)  
[www.leistungargentina.com.ar](http://www.leistungargentina.com.ar)



# LEISTUNG