


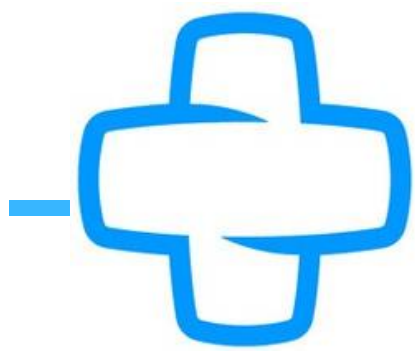

CAMILLA DE TRASLADO Y4A (II)

Para su uso en paciente Adulto y pediátrico.

Características del producto

- Radiotransparente en la sección del respaldo.
- Estructura de acero y base de ABS.
- Sistema de elevación hidráulico activado mediante pedal.
- Ajuste de la sección de espalda mediante resorte de gas.
- Barandales laterales abatibles.
- Ruedas de 20 cm de diámetro con sistema centralizado de freno.
- Quinta rueda central para apoyo en la dirección.
- Ruedas parachoques en las cuatro esquinas.
- Colchón de espuma de PU de 12 cm de espesor.
- Cinturones para sujeción del paciente.
- Orificios para poste porta sueros en las cuatro esquinas.

Uso sugerido

- Para la movilización y traslado del paciente adulto y pediátrico dentro del hospital.

Aplicación

- Para la movilización y traslado del paciente dentro del hospital, traslados entre las distintas áreas de cuidado y tratamiento tales como: hospitalización, terapia intensiva e intermedia adulto y pediátrico, quirófano, recuperación, urgencias, sala de choque, hemodinamia, etc.

Indicaciones de uso

- Lea el manual de usuario antes de operar la camilla.
- Equipo para uso solo por profesionales de la salud o personal capacitado

Instrucciones de uso

1. Coloque la camilla con los barandales laterales abajo en forma paralela a la cama o mesa quirúrgica en donde se encuentre el paciente.
2. De a la camilla la altura necesaria usando el pedal de activación del pistón.
3. Asegure la camilla colocando el freno centralizado accionándolo con el pedal correspondiente.
4. Coloque al paciente en la camilla.
5. En caso de requerirse, coloque la posición que necesite el paciente.
6. Suba los barandales laterales.
7. Asegure al paciente con los cinturones de sujeción.
8. Al movilizar la camilla, puede utilizar la quinta rueda accionándola con el pedal destinado a esta función para apoyo con la dirección de la camilla.



Contraindicaciones de uso

- No se utilice si la camilla presenta daños en su estructura.
- No se utilice la camilla si muestra manchas o suciedad en el colchón.
- No utilice la camilla si el sistema de freno, barandales o los pistones muestran algún tipo de falla.

Advertencias

- La institución y personal (usuario final) son responsables del buen uso de la camilla.
- Se recomienda que la camilla se encuentre en su posición mas baja cuando no se este en utilizando.
- Tenga cuidado al bajar la camilla. Asegúrese de que los artículos en el compartimento de almacenamiento no interfieran con el marco superior o los soportes de montaje del riel lateral; de lo contrario, podría dañar el equipo.
- Al bajar la altura de la camilla, asegúrese de que manos y pies del paciente así como equipos estén alejados de los ensamblajes del marco de la camilla. El no hacerlo podría resultar en lesiones al paciente o daños a los equipos.



Especificaciones técnicas

- Dimensiones (largo y ancho). 230 cm – 77 cm.
- Ajuste de altura. 62 cm – 93 cm.
- Ajuste de respaldo. 0° - 75°.
- Ajuste de sección de rodillas. 0° - 35°.
- Trendelenburg. 0° - 12°.
- Trendelenburg inverso. 0° - 12°.
- Carga segura de trabajo. 260 kg.
- Ruedas de PU de alta resistencia. 20 cm de diámetro.

Empaque primario

- Caja de madera
- Largo. 240 cm.
- Alto. 84 cm.
- Ancho. 64 cm.

Condiciones de uso

- Temperatura: -40°C - 55°C.
- Humedad relativa: 20% - 95%.
- Presión atmosférica: 86kPa - 1060kPa.

Condiciones de almacenamiento

- Temperatura: -40°C - 55°C.
- Humedad relativa: 20% - 95%.
- Presión atmosférica: 500kPa – 106kPa.
- Apile máximo 5 cajas.

Manual usuario	Incluido de manera física en su empaque primario.
Mantenimiento	Cada 6 meses por personal capacitado y autorizado por el distribuidor.
Eliminación segura del producto	Apegado al protocolo de cada institución o región

Información de soporte técnico

Luabfe de México.
Aguascalientes No. 536, el Mante
Zapopan Jalisco. C.P.45235.
Tel. +52 33 3109 0728 ext. 105

Normas aplicables

- NOM-001-SCFI
- NOM-241-SSA1
- NOM-050-SCFI
- NOM-137-SSA1

Este producto solamente puede ser operado por el personal de salud capacitado